

**Инструкция по применению.
Тест для определения беременности ББ тест**

ПОКАЗАНИЯ:

Для определения беременности

ПРИНЦИП МЕТОДА:

ББ тест определяет хорионический гонадотропин человека в концентрации от 10 МЕ/л.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Соберите мочу (рекомендуется первая утренняя моча) в сухую и чистую емкость.
- Вскройте упаковку из фольги.
- Достаньте тест-полоску.
Погрузите её вертикально в емкость с мочой до красной отметки (не глубже!) на 5- 10 секунд.
- Положите тест-полоску на горизонтальную поверхность, подождите 5 минут и прочтите результат.

Достоверным считается результат, появившийся на тест-полоске в период от 5-й до 10-й минуты от момента извлечения ее из мочи. Все изменения на тест-полоске в период до 5-й и после 10-й минуты, не учитывать.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ:

1. Результат отрицательный (беременности нет).
В зоне считывания результата появляется одна розовая линия.
2. Результат положительный (беременность есть).
В зоне считывания результата появляются две розовые линии.
3. Если в результате тестирования в зоне считывания результата не появилось ни одной розовой линии, то это означает, что тестирование было проведено неверно или был использован непригодный тест.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Только для диагностики «*In vitro*».

Хранить при температуре от + 4 °С до + 30 °С.

Не использовать тест по истечении срока годности, указанного на упаковке, а также в случае, если индивидуальная упаковка из фольги была повреждена.

Перед использованием внимательно прочитать инструкцию.

Повторно не использовать!

Хранить в недоступном для детей месте!

РУ №ФСЗ 2011/11265 от 04.09.2020

Производитель:

«ВЕДАЛАБ АО»

Рю де Л'Экспансион

ЗАТ дю Лонди-Серис-Б.П.181

61006 Аленсон седекс, Франция

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ИННОТЕК»

115035, Москва, Садовническая набережная, 71

тел. 8 800 250 17 38

www.innotech.ru

e-mail: innotech@innotech.ru